

COLECTOR DE ORINA CON TIRA



Referencia	Código Nacional	Talla	Diámetro aprox. (mm)	Presentación	EAN
304031	481796.6	1	20	Caja de 30 Juegos	8470004817966
304032	481804.8	2	25		8470004818048
304033	481812.3	3	30		8470004818123
304034	455790.9	4	35		8470004557909
304035	481820.8	5	40		8470004818208
304014	449793.9	4	35	Caja de 12	8470004497939

Indicaciones:

- ▲ Indicado para los hombres que sufren pérdida involuntaria de orina.
- ▲ Un solo uso.

Descripción:

- ▲ El colector de orina masculino Corysan está fabricado en látex natural de calidad médica.
- ▲ No estéril.
- ▲ Está diseñado para acomodar los cambios en el tamaño del pene y proporcionar flexibilidad suave a lo largo de la longitud del pene.
- ▲ El cono está diseñado para eliminar la posibilidad de torsión del sistema de drenaje, el bloqueo del flujo de orina y fugas o que se hinche el colector.



Presentación:

- ▲ Presentación individual en bolsa sellada.
- ▲ Cada juego está formado por:
 - un adaptador de látex natural para el pene,
 - una tira de sujeción con adhesivo hipoalérgico sobre soporte de polietileno.

Instrucciones de uso:

Colocación del colector:

1. Limpiar y secar el pene, recortar el exceso de vello púbico.
2. Mantener el colector lejos de la cabeza del pene.
3. Desenrollar el colector aproximadamente 2 mm y reservar espacio entre la parte superior de la vaina y la cabeza del pene antes de rodar la vaina sobre el pene.
4. Desenrollar suavemente el colector a lo largo de la longitud del pene.
5. Envolver la tira adhesiva alrededor del extremo del colector y la base del pene con el fin de prevenir el deslizamiento del catéter.
6. Asegurarse de que la cinta adhesiva no se aplica con demasiada fuerza con el fin de evitar la constricción de circulación.
7. Colocar la bolsa de orina al colector.

Retirada del colector:

1. Desconectar el colector de la bolsa de orina.
2. Retirar con cuidado la cinta adhesiva.
3. Girar el colector a lo largo de la longitud del pene y levantar suavemente.

Recomendación:

- ▲ Cambiar el colector máximo cada 24 horas.
- ▲ No aplicar la cinta adhesiva con demasiada fuerza, a fin de evitar restricción de la circulación.

Alergia al látex:

- ▲ Producto fabricado en látex.
- ▲ No utilizar el producto si se sabe que es sensible o alérgico al látex. En caso de tener sospecha de sensibilidad al látex, dejar de utilizar el colector y comunicarlo al médico. No volver a usar el catéter.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario con marcado CE, Clase I.