



BOLSAS DE RECOGIDA DE ORINA PEDIÁTRICA



Referencia	Código Nacional	Presentación envase	EAN
303001	337261.9	12 unidades	8470003372619

Indicaciones:

- ▲ Para la recogida de orina pediátrica.
- ▲ Está diseñada para un uso continuado inferior a 24 horas.
- ▲ Apto para ambos sexos.

Descripción:

- ▲ Capacidad de 150 ml.
- ▲ Esterilizado por Óxido de Etileno.

Composición:

- ▲ Bolsa: polietileno transparente.
- ▲ Adhesivo hipoalergénico.



Instrucciones de uso:

- ▲ Para el uso femenino, colocar la abertura de la bolsa hasta cubrir la mitad superior de los órganos genitales.
- ▲ Para el uso masculino, se debe proyectar el pene por la abertura de la bolsa.
- ▲ Una vez obtenida la orina, sacar la bolsa y doblar las dos superficies adhesivas juntas. La bolsa se convierte en un contenedor sellado para ser entregado al laboratorio.
- ▲ Conservar la orina según las indicaciones de su médico.

Advertencia:

- ▲ Producto de un solo uso.
- ▲ El producto permanece estéril mientras que la bolsita contenedora permanece cerrada, y no está rota ni perforada.
- ▲ No utilizar después de la fecha de caducidad.

Conservación:

- ▲ Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de toda fuente de calor.
- ▲ Almacenar alejado de la luz directa.

Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I estéril.