



SUSPENSORIO DE ALGODÓN - CORYSAN



Referencia	Descripción	Código Nacional	EAN
313004	SUSPENSORIO CORYSAN ALGODÓN T- 4	206490.4	8470002064904
313006	SUSPENSORIO CORYSAN ALGODÓN T- 6	206508.6	8470002065086
313008	SUSPENSORIO CORYSAN ALGODÓN T- 8	206516.1	8470002065161
313010	SUSPENSORIO CORYSAN ALGODÓN T-10	206524.6	8470002065246
313012	SUSPENSORIO CORYSAN ALGODÓN T-12	206532.1	8470002065321

Indicaciones:

- ▲ Protección e inmovilización del aparato genital después de traumatismos importantes.
- ▲ Indicado cuando hay afecciones infecciosas o vasculares.
- ▲ Protección a los microtraumatismos repetidos. Evita microlesiones internas.
- ▲ Previene problemas circulatorios.
- ▲ Protección e inmovilización post-cirugía (fimosis, vasectomía, etc.).

Descripción:

- ▲ Bolsa escrotal de algodón transpirable.
- ▲ Cintura elástica (2,5 cm de ancho).
- ▲ Cinturón y tensores bajo nalga, elásticos, con banda de silicona (1,5 cm de ancho).
- ▲ Provisto de broche y hebillas con cantos redondos para evitar rozaduras.
- ▲ Color blanco.



Características:

TALLA	LARGO CINTURA ELÁSTICA (cm)	LARGO CINTA BAJO NALGAS (cm)	BOLSA ESCROTAL (largo/ancho) (cm)
T4	80	70	13/8
T6	85	80	13.5/8
T8	90	80	15/10
T10	95	90	15/10
T12	110	100	16.5/12.5

Instrucciones de uso:

- ▲ Pasar los ojales de las cintas bajo nalga por la cinta de la cintura.
- ▲ Ajustar la cintura.
- ▲ Recoger el escroto en la malla.
- ▲ Acabar de ajustar las cintas bajo nalga.

Advertencias:

- ▲ El grado de presión será siempre bajo criterio facultativo.
- ▲ No ajustar en exceso.

Conservación:

- ▲ Lavar a mano con agua fría y jabón neutro.
- ▲ Mantener alejado de toda fuente de calor, y en lugar seco.

Alergia al látex:

- ▲ La goma elástica contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.