



## FÉRULA DIGITAL ANATÓMICA - CORYSAN



Descripción	Referencia	Código Nacional	Dimensiones	EAN
Caja de 10 unidades	105610	337451.4	8,8x8 cm	8470003374514
Caja de 50 unidades	105650	-	8,8x8 cm	8428166156508

### Indicaciones:

- ▲ Órtesis para la inmovilización temporal de la articulación inter-falángica distal, pudiéndose adaptar a la posición deseada de cualquier dedo de la mano.

### Composición:

- ▲ Férula digital preformada de aluminio y espuma (foam).
- ▲ Aluminio de espesor 0,5 mm.
- ▲ Espuma de color blanco y de espesor 9 mm.

### Descripción:

- ▲ Bordes redondeados.
- ▲ Acolchado con goma espuma en la parte interna.
- ▲ La espuma evita la sudoración de la zona.
- ▲ Fácilmente moldeable, adaptable a cualquier dedo.
- ▲ Radiopaca.
- ▲ Talla única.
- ▲ Un solo uso.
- ▲ Material no estéril.



**Instrucciones de colocación y advertencias:**

- ▲ La férula debe ser adaptada por un técnico ortopédico o facultativo.
- ▲ Colocar el dedo afectado sobre la espuma de la férula, moldeando el aluminio a la posición deseada, doblando las 4 aletas de forma que abracen el dedo con una presión ligera.
- ▲ En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico.
- ▲ Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

**Instrucciones de mantenimiento:**

- ▲ Almacenar en lugar seco, alejado de la luz y de toda fuente de calor.
- ▲ Evitar la luz directa, de lo contrario la espuma cambia su color, oscureciéndose. Esto es solo un aspecto estético y no modifica su funcionalidad.

**Alergia al látex:**

- ▲ No contiene látex.

**Normativa:**

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.