

FÉRULA DIGITAL ANATÓMICA



Descripción	Referencia	Código Nacional	Dimensiones (largo x ancho)	EAN
Caja de 10 unidades	105610	337451.4	8,8x8 cm	8470003374514
Caja de 50 unidades	105650	-	8,8x8 cm	8428166156508

Indicaciones:

- ▲ Órtesis para la inmovilización temporal de la articulación inter-falángica distal, pudiéndose adaptar a la posición deseada de cualquier dedo de la mano.

Composición:

- ▲ Férula digital preformada de aluminio y espuma de poliuretano (foam).
- ▲ Adhesivo de base acrílica.
- ▲ No contiene látex natural.

Descripción:

- ▲ Soporte de aluminio de espesor 0,5 mm. adherido a espuma de color blanco y espesor de 9 mm. en la parte interna.
- ▲ Bordes redondeados.
- ▲ La espuma evita la sudoración de la zona.
- ▲ Fácilmente moldeable, adaptable a cualquier dedo.
- ▲ Radiopaca.
- ▲ Talla única.
- ▲ Un solo uso.
- ▲ Producto no estéril.

Instrucciones de colocación y advertencias:

- ▲ La férula debe ser adaptada por un técnico ortopédico o facultativo.
- ▲ Colocar el dedo afectado sobre la espuma de la férula, moldeando el aluminio a la posición deseada, doblando las 4 aletas de forma que abracen el dedo con una presión ligera.
- ▲ En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico.
- ▲ Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

Instrucciones de mantenimiento:

- ▲ Almacenar en lugar seco, alejado de la luz y de toda fuente de calor.
- ▲ Evitar la luz directa, de lo contrario la espuma cambia su color, oscureciéndose. Esto es solo un aspecto estético y no modifica su funcionalidad.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.