



SONDA VESICAL SILICONA RÜSCH BRILLANT



Referencia	Código Nacional	Tamaño (Ch)	Diámetro (mm)	EAN
307312	456459.4	12	4	8470004564594
307314	456467.9	14	4.7	8470004564679
307316	456475.4	16	5.3	8470004564754
307318	456483.9	18	6	8470004564839
307320	456491.4	20	6.7	8470004564914
307322	456509.6	22	7.3	8470004565096
307324	456517.1	24	8	8470004565171

Indicaciones:

- ▲ Drenaje de 2 vías estándar.
- ▲ La silicona es biocompatible, bioestable y no alergénica. Su superficie previene la formación de incrustaciones.
- ▲ Gran capacidad de drenaje, idóneo también para utilización a largo plazo.
- ▲ Alto nivel de confort para el paciente.
- ▲ Las sondas vesicales se introducen a través de la uretra hasta la vejiga y sirven para drenar orina o para instalar un líquido en ella (medicamentoso o de lavado).
- ▲ Para heridas problemáticas en la uretra, o después de una uretrotomía.

Descripción:

- ▲ **Presentación:** Envase de 10 unidades con cupón precinto individual.
- ▲ Sonda con balón de 10 ml de capacidad.
- ▲ Aproximadamente 41 cm de longitud.
- ▲ Cilíndrica con 2 orificios opuestos.
- ▲ Sondas flexible que presentan una compatibilidad óptima con los tejidos y no provocan irritaciones en las mucosas.
- ▲ Punta plena según Tiemann.
- ▲ Fabricado en silicona, transparente.
- ▲ Punta radiopaca y banda de contraste a lo largo del cuerpo de la sonda.
- ▲ Válvula para racores de jeringa Luer y Luer-lock.
- ▲ De un solo uso.
- ▲ Estéril, siempre que no se haya dañado o abierto el envase.

Conservación:

- ▲ Almacenar en un ambiente limpio, fresco y seco, sin recibir luz directa.

Precauciones y advertencias:

- ▲ Después de varias semanas, la permanencia de las sondas con balón, no suelen presentar síntomas de incrustaciones en el lumen de la sonda, al ser transparente, se puede visualizar y evaluar.
- ▲ La caña y el terminal de la sonda se colorean de amarillo a marrón oscuro según aumenta la incrustación.
- ▲ La sonda debería sustituirse cuando su coloración sea marrón claro.
- ▲ Se puede esterilizar repetidas veces con vapor a 134°C y óxido de etileno, así como desinfectarse con líquido desinfectante.
- ▲ No se deben utilizar lubricantes que contengan siliconas.
- ▲ No usar lubricantes a base de petróleo.
- ▲ Este producto no contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario de **Clase IIb**. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1591/2009, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

CE 0124