

CATHEJELL CON LIDOCAÍNA



Referencia	Código Nacional	Presentación	EAN
308025	178237.3	Cajas de 25 unidades mono-dosis de 12,5 gramos	8470001782373

Descripción:

- ▲ Gel lubricante estéril.
- ▲ Embalaje estéril.
- ▲ Antiséptico y anestésico.
- ▲ De un solo uso.
- ▲ Jeringa en forma de acordeón lista para su uso.
 - Instilación suave y controlada.
 - No hay bloqueo del pistón, como en una jeringa estándar.
- ▲ Gel transparente 12,5g.
 - Soluble al agua y transparente, para instilación intra-uretral.
- ▲ Aplicador con forma cónica.
 - Suave, sin bordes afilados, atraumático.
 - Diseño anatómico – fácil instilación.



- ▲ Punta rompible.
 - Facilidad para romperla y desprenderla.
 - Se rompe dentro del propio envase.
- ▲ Aplicación asegurada y efectiva.
- ▲ Ideal para la aplicación con una sola mano.
- ▲ Instilación gradual y suave.
- ▲ Compatible con el uso de instrumental metálico.
- ▲ Muy buena tolerancia.
- ▲ Esterilización mediante vapor de agua – no produce restos de óxido de etileno. (Los residuos de óxido de etileno sobre el instrumental puede derivar en estenosis de la uretra).
- ▲ Compatible con todos los materiales utilizados en los procedimientos de instilación uretral, como látex, silicona o PVC.

Indicaciones:

- ▲ Para instilación dentro de la uretra antes de insertar una sonda o un instrumento médico.
- ▲ Utilización en pacientes, hombres y mujeres, de más de 2 años de edad.

Composición:

- ▲ El gel contiene hidrocloreto de lidocaína que actúa como anestésico local y hidrocloreto de clorhexidina que tiene propiedades antisépticas.
- ▲ PH de 5.
- ▲ No grasa, soluble en agua, incoloro, inodoro y sin ingredientes activos.
- ▲ No mancha.
- ▲ Sin látex.
- ▲ Termosensible.



1



2

1.- Método para romper la punta.

2.- La inserción suave del catéter solamente se consigue si se llena previamente la uretra con el gel lubricante. Después de la instilación del gel, se debe esperar 5-10 minutos antes de introducir la sonda o cualquier instrumento médico – es el tiempo necesario para que la lidocaína haga efecto. Está demostrado que, si se aplica el lubricante sobre la sonda o el instrumento, no se consigue el efecto deseado. El gel se elimina con el roce al insertar el dispositivo en la uretra.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario de **Clase III**. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1591/2009, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

CE₀₁₂₄