

BOLSA RECOGIDA DE ORINA PIERNA COMPLET



Referencia	Código Nacional	Presentación envase	Longitud tubo de admisión	EAN
303031	491415.3	30 unidades	35 cm	8470004914153
303030	491423.8	30 unidades	50 cm	8470004914238

Indicaciones:

- ▲ Las bolsas de recogida de orina para pierna Corysan están indicadas para la recogida de orina diurna.

Descripción:

- ▲ Capacidad aproximada de 750 ml.
- ▲ Lámina frontal transparente con aspecto lechoso y escala graduada aproximativa.
- ▲ Lámina trasera blanca, para mejor control visual de la orina.
- ▲ Lámina trasera de tejido sin tejer Non Woven, para mayor confort.
- ▲ Diseño con **forma contorneada**.
- ▲ Con válvula de seguridad anti-retorno.
- ▲ Con **válvula de vaciado en cruz**, para facilitar el vaciado con una sola mano.
- ▲ Tubo de admisión fabricado en cloruro de polivinilo de aspecto translúcido.
- ▲ Conector fabricado con cloruro de polivinilo blanco.
- ▲ Funda o capuchón del conector fabricado con polietileno violeta.

Accesorios:

- ▲ Un juego de cintas elásticas con gemelos para sujeción a la pierna (1,9x39cm).

Instrucciones de uso:

- ▲ Acoplar el conector del extremo del tubo a la sonda o al colector de pene.
- ▲ En la parte superior e inferior de la bolsa hay orificios para colocar las cintas de sujeción.

Precauciones:

- ▲ Un solo uso. La reutilización de la bolsa puede producir riesgo de infección.
- ▲ No estéril.
- ▲ Este no es un producto con función de medición.
- ▲ La bolsa debe ser vaciada en el WC antes de tirarla. Una vez vacía, descartar en la basura.
- ▲ No contiene látex.
- ▲ No aplastar, pinzar o colapsar el tubo durante la utilización del producto para evitar restringir el flujo de la orina hacia la bolsa.

Conservación:

- ▲ Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de toda fuente de calor.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.