



ANDADOR ACERO CON ASIENTO CYMAM OSCOS



Referencia	EAN
906030	8428166960303

Indicaciones:

- ▲ Producto de apoyo a la movilidad de personas.
- ▲ Ayuda a la deambulación, aportando estabilidad y seguridad durante la marcha.
- ▲ Para usuarios con movilidad reducida, que presentan un déficit de movilidad, dificultad motora, problemas de equilibrio o que requieran cualquier tipo de apoyo en la deambulación.
- ▲ Recomendado para utilizarlo en interiores y desplazamientos cortos, sobre superficies planas y sin desnivel.

Características:

- ▲ Color: Verde.
- ▲ Ligero.
- ▲ Material: Acero
 - Ruedas de PVC macizas de 110mm.
 - Conteras de 22mm.

- ▲ Plegable.
- ▲ Con asiento acolchado abatible.
- ▲ Con sistema de freno en puño.
- ▲ Peso máximo de usuario: 100Kg.
- ▲ Empuñadura anatómica.
- ▲ Dimensiones:
 - Ancho asiento: 40cm.
 - Fondo asiento: 20cm.
 - Altura asiento-suelo: 54cm.
 - Altura total: 73-93cm
 - Ancho total: 58cm
 - Fondo total: 58cm
 - Peso producto: 5,6Kg

Mantenimiento y limpieza:

- ▲ Comprobar periódicamente que todos los componentes (pernos, tuercas, ruedas, conteras...) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.
- ▲ Para la limpieza utilizar detergentes neutros y secar con un trapo suave.
- ▲ Para su desinfección utilizar un desinfectante no abrasivo.
- ▲ Mantener el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre en su embalaje.

Precauciones:

- ▲ La adaptación del producto debe ser realizada por un médico o técnico especialista, para regular la altura del andador, garantizar la activación del freno y del buen funcionamiento y uso en general.
- ▲ Debe ser utilizado por personas que tengan capacidad motora y cognitiva suficiente para utilizarlo sin riesgo.
- ▲ Producto para ser utilizado por un único usuario.
- ▲ Las ruedas y conteras deben estar en contacto con el suelo para garantizar la estabilidad del andador.
- ▲ Antes de sentarse, asegurarse que el andador está en una posición segura.



- ▲ Apoyarse siempre sobre ambos manillares, tanto en la marcha como al levantarse del asiento.
- ▲ No utilizar el asiento del andador para trasladar cosas o personas.
- ▲ No colgar bolsas ni otros artículos de las empuñaduras, podría producirse inestabilidad y/o vuelco del andador.
- ▲ Utilizar el andador solo sobre superficies sólidas y planas. Tener especial cuidado en el paso de bordillos, evitando aquellos más altos.
- ▲ No utilizar el andador para subir escaleras.
- ▲ Al plegar el andador, asegurarse de que ninguna parte de la ropa o del cuerpo pueda quedar atrapada.
- ▲ Las partes acolchadas del andador expuestas a la luz solar directa se calientan y pueden causar quemaduras en la piel por contacto.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.