



## **ANDADOR ALUMINIO CON ASIENTO CYMAM** **TEVERGA**



Referencia	EAN
906025	8428166960259

### **Indicaciones:**

- ▲ Producto de apoyo a la movilidad de personas.
- ▲ Ayuda a la deambulación, aportando estabilidad y seguridad durante la marcha.
- ▲ Para usuarios con movilidad reducida, que presentan un déficit de movilidad, dificultad motora, problemas de equilibrio o que requieran cualquier tipo de apoyo en la deambulación.

### **Características:**

- ▲ Color: Azul.
- ▲ Muy ligero y maniobrable.
- ▲ Material: Aluminio.
- ▲ Con asiento.
- ▲ Plegable.
- ▲ Peso máximo de usuario: 100Kg.
- ▲ Dimensiones:
  - Largo: 55cm
  - Ancho: 63,5cm
  - Alto: 85,3 – 94,2cm
- ▲ Peso producto: 2,8cm.

- ▲ Dispone de 4 puntos de apoyo, 2 con ruedas directrices fijas y 2 con conteras de goma.
- ▲ Empuñaduras regulables en altura.

### **Mantenimiento y limpieza:**

- ▲ Comprobar periódicamente que todos los componentes (pernos, tuercas, ruedas, conteras...) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.
- ▲ Para la limpieza utilizar detergentes neutros y secar con un trapo suave.
- ▲ Para su desinfección utilizar un desinfectante no abrasivo.
- ▲ Mantener el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre en su embalaje.

### **Precauciones:**

- ▲ La adaptación del producto debe ser realizada por un médico o técnico especialista, para regular la altura del andador, garantizar la activación del freno y del buen funcionamiento y uso en general.
- ▲ Debes ser utilizado por personas que tengan capacidad motora y cognitiva suficiente para utilizarlo sin riesgo.
- ▲ Producto para ser utilizado por un único usuario.
- ▲ Las ruedas y conteras deben estar en contacto con el suelo para garantizar la estabilidad del andador.
- ▲ Antes de sentarse, asegúrese que el andador está en una posición segura.
- ▲ Apoyarse siempre sobre ambos manillares, tanto en la marcha como al levantarse del asiento.
- ▲ No utilice el asiento del andador para trasladar cosas o personas.
- ▲ No cuelgue bolsas ni otros artículos de las empuñaduras, podría producirse inestabilidad y/o vuelco del andador.
- ▲ Utilice el andador solo sobre superficies sólidas y planas. Tenga especial cuidado en el paso de bordillos, evitando aquellos más altos.
- ▲ No utilice el andador para subir escaleras.
- ▲ Al plegar el andador, asegúrese de que ninguna parte de la ropa o del cuerpo pueda quedar atrapada.

### **Normativa:**

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.