



FONENDOSCOPIOS DOBLE CAMPANA CORYSAN



Referencia	Tipo	EAN
506023	Adulto	8428166560237
506024	Adulto con estuche	8428166560244
506025	Pediátrico	8428166560251

Descripción:

- ▲ Aparato acústico que se utiliza para escuchar los ruidos cardiacos, pulmonares o intestinales, gracias a la capacidad que tiene de amplificación de los sonidos.

Indicaciones:

- ▲ Generalmente se utiliza en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios.
- ▲ Para escuchar sonidos de baja frecuencia como por ejemplo, los pulmones, se utiliza la campana.
- ▲ En cambio, para percibir sonidos de frecuencias más altas, como el corazón, se usa la membrana.

Instrucciones de uso:

- ▲ Compruebe que las olivas están orientadas hacia delante antes de colocárselas en los oídos. De este modo los tubos auriculares se alinean con los conductos auditivos, aumentando la comodidad y la transmisión del sonido.
- ▲ **Uso de la campana o el diafragma:** abrir el lado que quiera usar girando la pieza torácica. Si el diafragma está abierto, la campana estará cerrada, lo que evita que entre el sonido de la campana y viceversa.

Composición y medidas:

Partes del fonendoscopio				
	Binaurals	Tubo	Campana	Olivas y membrana
Composición	Aluminio	PVC	Aluminio	PVC
Medidas	16 cm	61 cm	46 mm (adulto) / 33 mm 37 mm (pediátrico)	

Instrucciones de mantenimiento y almacenamiento:

- ▲ No almacenar cerca de una fuente de calor.
- ▲ Evitar fuertes cambios de temperatura.
- ▲ Almacenar en lugar seco.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.