



BOLSA GEL FRÍO-CALOR



Referencia	Código Nacional	EAN
907015	195922.5	8470001959225

Descripción:

- ▲ Bolsa de gel que se usa para aliviar algunos síntomas y/o disfunciones generadas por enfermedades en el cuerpo humano.

Características:

- ▲ Medidas: 12,5 x 24,6 cm.
- ▲ Material externo: Nylon tafetán recubierto de PVC.
- ▲ Composición interior:
 - Agua: 60-80%
 - Glicerina: 10-30%
 - Sodio de Carboximetilcelulosa: 1-5%.

Instrucciones de uso:

▲ Terapia de frío:

- Para controlar y aliviar la hemorragia y el dolor causados por la tensión, los moretones, los tirones y las quemaduras, también puede eliminar rápidamente el dolor y las molestias inducidas por la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de muelas y la picadura de mosquitos.
- Ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación.
- Uso genérico: moretones, esguinces, traumatismos, hipertermia y en todos los casos donde se necesita crioterapia.

▲ Terapia de calor:

- Proporciona alivio para las articulaciones doloridas y rígidas, dolores musculares, tensión muscular y calambres.
- Uso genérico: lumbago, rigidez en el cuello, reumatismo, estado hipotérmico, traumatismo musculoesquelético (sin inflamación aguda), calambres menstruales y en todos los casos donde se requiera la aplicación de calor.

Restricciones de uso:

- ▲ Piel anestésica.
- ▲ Alergia al frío / urticaria inducida por el frío.
- ▲ Isquemia miocárdica inducida por frío (u otra enfermedad cardíaca o pulmonar inestable).
- ▲ Diabetes mellitus (cuando es complicada por enfermedad vascular o pérdida sensorial).
- ▲ Enfermedad vascular periférica.
- ▲ El fenómeno de Raynaud.
- ▲ Lupus eritematoso sistémico.
- ▲ Heridas abiertas descubiertas.
- ▲ Paralítico.
- ▲ Neuropatía periférica diabética.
- ▲ Piel no sensible.

Instrucciones de uso - AGUA CALIENTE O MICROONDAS:

- ▲ Caliente el producto en el microondas durante 50 segundos a potencias medias altas.
- ▲ Prolongue su exposición al calor a intervalos regulares de 10 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada.
- ▲ Sumergir en agua hirviendo (extraída del fuego) durante al menos 2 minutos.
- ▲ Utilizar según las instrucciones del médico.

Instrucciones de uso – CONGELADOR:

- ▲ Almacenar en un congelador durante al menos una hora antes de usar.
- ▲ Para emergencias, siempre mantenga un paquete en el congelador para uso inmediato.
- ▲ Utilizar según las instrucciones del médico.

Información de seguridad:

- ▲ Manéjese con cuidado.
- ▲ Proteger de la humedad y del agua.
- ▲ Minimizar la generación y acumulación de polvo.
- ▲ Evitar contacto visual.
- ▲ Evitar la ingestión.
- ▲ Estabilidad química:
 - La mezcla es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.
 - La descomposición puede ocurrir a temperaturas extremadamente altas.
 - Condiciones a evitar: Oxidantes fuertes.
 - Materiales incompatibles: Reactivo con agentes oxidantes.

Almacenamiento y conservación:

- ▲ El dispositivo se suministra en estuche de Corysan lo que garantiza su correcto almacenaje.
- ▲ Para mantener la conservación a lo largo del tiempo, es recomendable utilizar siempre el embalaje original.
- ▲ Almacenar en un ambiente fresco y seco, que no esté en contacto directo con fuentes de calor radiantes.
- ▲ Mantener alejado de sustancias incompatibles, alimentos, bebidas y polvo e impurezas.
- ▲ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ▲ No apilar partes pesadas sobre el dispositivo.
- ▲ No someterlo a esfuerzos mecánicos

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.