

BRAGUERO INGUINAL DERECHO



Referencia	Descripción	Código Nacional	EAN
406000	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T- 80	449546.1	8470004495461
406001	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T- 85	449553.9	8470004495539
406002	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T- 90	449561.4	8470004495614
406003	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T- 95	449579.9	8470004495799
406004	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T-100	449587.4	8470004495874
406005	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T-105	449595.9	8470004495959
406006	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T-110	449603.1	8470004496031
406007	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T-115	449611.6	8470004496116
406008	BRAGUERO CORYSAN DERECHO T-120	-	8428166460087

BRAGUERO INGUINAL IZQUIERDO



Referencia	Descripción	Código Nacional	EAN
406500	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T- 80	449629.1	8470004496291
406501	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T- 85	449637.6	8470004496376
406502	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T- 90	449645.1	8470004496451
406503	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T- 95	449652.9	8470004496529
406504	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T-100	449660.4	8470004496604
406505	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T-105	449678.9	8470004496789
406506	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T-110	449686.4	8470004496864
406507	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T-115	449694.9	8470004496949
406508	BRAGUERO CORYSAN IZQUIERDO T-120	-	8428166465082

BRAGUERO DOBLE O BILATERAL



Referencia	Descripción	Código Nacional	EAN
407000	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T- 80	449702.1	8470004497021
407001	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T- 85	449710.6	8470004497106
407002	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T- 90	449728.1	8470004497281
407003	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T- 95	449736.6	8470004497366
407004	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T-100	449744.1	8470004497441
407005	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T-105	449751.9	8470004497519
407006	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T-110	449769.4	8470004497694
407007	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T-115	449777.9	8470004497779
407008	BRAGUERO CORYSAN DOBLE T-120	-	8428166470086

BRAGUERO UMBILICAL



Referencia	Descripción	Código Nacional	EAN
407300	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T- 80	154428.5	8470001544285
407301	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T- 85	154429.2	8470001544292
407302	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T- 90	154590.9	8470001545909
407303	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T- 95	154592.3	8470001545923
407304	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T-100	154593.0	8470001545930
407305	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T-105	154594.7	8470001545947
407306	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T-110	154595.4	8470001545954
407307	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T-115	154596.1	8470001545961
407308	BRAGUERO CORYSAN UMBILICAL T-120	-	8428166473087

Indicaciones:

- ▲ Producto sanitario destinado a utilizarse para la contención y/o la reducción de las hernias inguinales y umbilicales, así como en la prevención posquirúrgica de éstas.

Características:

- ▲ Cinturón y bajo nalga ajustables: cinta elástica de poliéster (26%), poliamida (33%) y goma (41%).
- ▲ Pala lavable de látex espumado y vulcanizado, con funda de algodón 100%.
- ▲ Partes metálicas de acero inoxidable, hierro galvanizado y fleje laminado niquelado.
- ▲ Cinturón y cinta bajo nalgas de color beige oscuro con una franja granate en cada extremo.
- ▲ Dimensiones:
 - Cinturón: 5 cm. de ancho; Longitud: 2-3 cm. más que el número de talla.
 - Cinta bajo nalgas: 2 cm. de ancho; Longitud: 47 cm. (aprox.) Con 5 ojales para el ajuste, separados a 2,5 cm. cada uno.

Elección de la talla:


- ▲ La talla del braguero indica la longitud del cinturón.
- ▲ Elegir una o dos tallas más de la medida de la cintura del paciente.
- ▲ El cinturón y las cintas bajo nalgas son ajustables.

Instrucciones de uso:

- ▲ Observar la hernia estando de pie.
- ▲ Nunca reducir la hernia ni colocar el braguero estando de pie.
- ▲ Reducir la hernia en posición decúbito supino (acostado y mirando hacia arriba), y apretar la hernia para introducirla.
- ▲ Una vez reducida, centrar la pala de contención sobre la zona inguinal o umbilical (según proceda) y ajustar el cinturón.
- ▲ En el caso de bragueros inguinales con bajo nalgas, estos se ajustarán para evitar que se escape la hernia por la parte inferior de la pala de contención.



Precauciones de uso:

- ▲ Siempre reducir la hernia antes de la colocación del braguero.
- ▲ En caso de manifestarse algún efecto secundario, suspender la utilización del producto y consultar con su médico.
- ▲ No es necesaria la colocación nocturna, salvo criterio médico.
- ▲ Contiene **látex** en la pala. 
No usar en caso de alergia a algún componente.
- ▲ El braguero se utilizará siempre bajo prescripción y vigilancia médica.
- ▲ Se recomienda la adaptación de la prenda por un profesional.
- ▲ No modificar la estructura del producto para no alterar su normal funcionamiento.
- ▲ Desechar el producto si está deteriorado o es defectuoso.

Almacenamiento y conservación:

- ▲ Lavar a mano con agua fría y jabón neutro.
- ▲ No planchar.
- ▲ Alejar de toda fuente de calor.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.