



## COJÍN VISCOELÁSTICO LONA



Referencia	Presentación	EAN
907060	Bolsa individual con asa	8428166970609

### Descripción:

- ▲ Cojín visco en un solo bloque.
- ▲ Composición:
  - Interior: poliuretano 50D visco.
  - Exterior: tejido lona.
- ▲ Dimensiones: 40 x 40 x 8 cm.
- ▲ No tiene limitación de peso máximo del usuario.

### Finalidad prevista:

- ▲ Prevención de escaras en personas incapacitadas que tienen que permanecer en sillas de ruedas.
- ▲ Aplicaciones: sillas, sillones, taburetes, sillas de ruedas...etc.

### Lavado y secado:

- ▲ Retirar la funda para su lavado. El cojín de visco no se puede lavar.
- ▲ Lavar a mano, a una temperatura máxima de 30°, utilizando jabón neutro.
- ▲ Una vez lavada, extiéndala sobre una superficie plana envuelta en una toalla y déjela secar.
- ▲ Poner especial atención en secar bien el elemento metálico.
- ▲ En ningún caso se debe utilizar lejía.

### Condiciones de almacenaje:

- ▲ Conservar en lugar seco.
- ▲ Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni a una fuente de calor.

### Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.