

MEDIA LARGA (A-F) COMPRESIÓN FUERTE



Referencia	Talla	Presentación	Código Nacional	EAN
207302	2	unidad	456855.4	8470004568554
207303	3	unidad	456863.9	8470004568639
207304	4	unidad	456871.4	8470004568714
207305	5	unidad	456889.9	8470004568899
207306	5L	unidad	456889.9	8428166273069

Indicaciones:

- ▲ Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, constitucional o postrombótica.
- ▲ Fuerte tendencia al edema.
- ▲ Varicosis secundaria.
- ▲ Atrofia blanca.
- ▲ Dermatoesclerosis.
- ▲ Tras la curación de úlceras graves.

Composición:

- ▲ 65% poliamida, 35% elastómero.
- ▲ Fabricadas con Lycra[®] Dupont.

Descripción:


- ▲ Compresión fuerte.
- ▲ Color beige.
- ▲ Compresión controlada, decreciente desde el tobillo hasta el final de la pierna.
- ▲ Forma totalmente anatómica.
- ▲ Bielástica de masaje continuo.
- ▲ Sin costuras.
- ▲ Debido a su malla especial se consigue una máxima adaptabilidad, con ausencia total de arruga.
- ▲ El tipo de compresión viene determinado por el valor de presión, en milímetros de mercurio (mm Hg), que la media ejerce en el tobillo: **30 - 40 mm Hg.**
- ▲ El gradiente de presión aproximada es el siguiente:
 - Tobillo: 100 %
 - Final Pantorrilla: 80 % como máximo
 - Final Muslo: 50 % como máximo

Funcionamiento:

- ▲ Debido a su compresión decreciente desde el tobillo hasta el final de la pierna, este tipo de prendas actúa ejerciendo una presión sobre las venas para acelerar el flujo sanguíneo, previniendo la formación de edemas y reduciendo el riesgo de trombosis.
- ▲ Gracias a su forma totalmente anatómica y al diseño del tejido producen un masaje continuo, consiguiendo una máxima adaptabilidad y la ausencia de arrugas.

Talla:

MEDIDAS DE USUARIOS (cm) - USERS MEASUREMENTS (cm)					
TALLA/SIZE	2 S	3 M	4 L	5 XL	6 XXL
b	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29
b1	25,5-26,5	27,5-29	30-31,5	32,5-34	35-36,5
c	31,5-33	34,5-36	37,5-39	40,5-42	43,5-45
d	29,5-31	32,5-34	35,5-37	38,5-40	41,5-43
f	42,5-44	45,5-47	48,5-50	51,5-53	54,5-59,5
g	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
A-B	11	12	12	13	13
A-B1	19	20	21	21	21
A-C	26	27	27,5	28	29
A-D	38	39	40	41	41,5
A-F	57	60	63	65	66
A-G	68	72	75,5	78	79

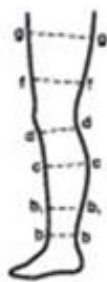

Instrucciones de uso:

- ▲ Ponérselas preferentemente al levantarse, cuando la pierna se encuentra deshinchada.
- ▲ Empezando por la puntera y tirando con firmeza hacia arriba a medida que se va colocando a la parte correspondiente, de esta forma no tendrán arruga alguna, obteniéndose un efecto terapéutico perfecto para sus piernas.

Conservación:

- ▲ Lavar con agua fría, jabón neutro y no planchar.
- ▲ Secar evitando los calores fuertes y directos.
- ▲ No aproximar a ninguna fuente de calor.

Precauciones:

- ▲ Este producto no contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.