

## COLLARÍN CERVICAL DERMES



| Referencia | Código Nacional | Talla | Perímetro del cuello aprox. (cm) | EAN           |
|------------|-----------------|-------|----------------------------------|---------------|
| 906513     | 166652.9        | P     | 32-36                            | 8470001666529 |
| 906514     | 166660.4        | M     | 36-40                            | 8470001666604 |
| 906515     | 166678.9        | G     | 40-44                            | 8470001666789 |

### Indicaciones:

- ▲ Órtesis simple para la inmovilización cervical debido a:
  - Esguinces cervicales leves o moderados sin estabilidad.
  - Traumatismos de partes blandas (latigazo cervical).
  - Otras lesiones cervicales leves (apófisis espinosas, transversas, etc.).
  - Procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios).
  
- ▲ Protección post-operatoria (determinados casos de artrodesis, laminectomías, tortícolis tratadas quirúrgicamente, etc.).

**Composición:**

- ▲ Dos piezas de polietileno superpuestas, regulables en altura mediante velcros.
- ▲ Bordes superior e inferior, protegidos con ribetes de goma forrados con skay.
- ▲ Abrochado en la parte posterior derecha con velcros.
- ▲ Almohadilla acolchada para apoyar el mentón.
- ▲ No contiene látex.


**Medidas (aproximadas):**

PARTE CORTA

| TALLA | MEDIDA A | MEDIDA B | MEDIDA C | MEDIDA D |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 1     | 6 cm     | 5.5 cm   | 6 cm     | 31 cm    |
| 2     | 6 cm     | 5.5 cm   | 6 cm     | 35 cm    |
| 3     | 6 cm     | 5.5 cm   | 6 cm     | 39 cm    |

PARTE LARGA

| TALLA | MEDIDA A | MEDIDA B | MEDIDA C | MEDIDA D |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 1     | 6 cm     | 9 cm     | 6 cm     | 42 cm    |
| 2     | 6 cm     | 9.5 cm   | 6 cm     | 46 cm    |
| 3     | 6 cm     | 10 cm    | 6 cm     | 50 cm    |

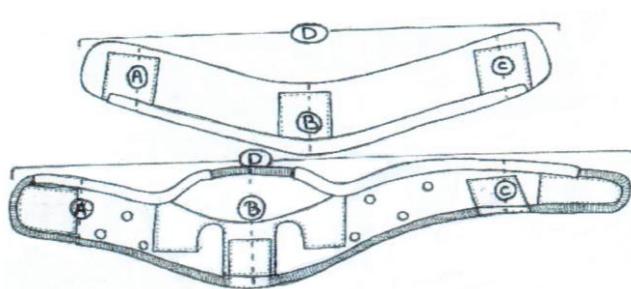

### Elección de la talla:

- ▲ La primera colocación deberá realizarla un profesional, quien a la vez le instruya particularmente de cómo hacerlo.
- ▲ La elección de la talla es de vital importancia para que el presente producto cumpla correcta y eficazmente las funciones para las cuales ha sido diseñado.
- ▲ Dicha elección es responsabilidad del técnico y ha de ser llevada a cabo por un profesional sanitario cualificado ya que un ajuste excesivo (presiones elevadas) puede ocasionar problemas en la glotis durante la extensión, mientras que un collar demasiado holgado puede disminuir la eficacia terapéutica.
- ▲ Poner especial atención a la regulación en la altura del collar.
- ▲ Para elegir la talla correcta bastará con medir el perímetro del cuello del paciente y consultar el cuadro de equivalencias que se encontrará en el envase de todos los collares.
- ▲ Una vez realizados los correspondientes ajustes por el técnico, preservarlos durante la vida útil del producto.

### Conservación:

- ▲ Lavar a mano con agua fría.
- ▲ No exponer a ninguna fuente de calor.

### Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.