



## **BASTÓN INGLÉS BIRREGULABLE NEBULFARMA<sup>®</sup>**



Referencia	Código Nacional	Unidad de venta	EAN
903078	159181.4	Individual	8470001591814

### **Indicaciones:**

- ▲ Facilita la deambulaci3n a personas con ciertas limitaciones de movilidad en el desplazamiento.

### **Descripci3n:**

- ▲ Bast3n ingl3s de codo.
- ▲ Tubo de color plateado, de 1,2 mm de espesor.
- ▲ Regulable en altura mediante sistema telesc3pico de tubos con pinza de fijaci3n.
- ▲ Embolsado individual.
- ▲ Regulable en codo mediante 3 posiciones.

### **Materiales:**

- ▲ Tubos de aluminio.
- ▲ Empuñadura y codera fabricada en polipropileno.
- ▲ Contera de P.V.C. con sistema de auto drenaje, tipo ventosa y que incorpora arandela de acero en su interior para preservar roturas.
- ▲ Pinza de acero y polipropileno.
- ▲ No contine látex natural.

### **Características:**

- ▲ Talla única: Adulto.
- ▲ Color combinado: blanco y violeta.
- ▲ Peso máximo del usuario: 125 kg.
- ▲ Diámetro externo de los tubos: 22 mm. el superior y 19 mm. el inferior.
- ▲ Longitud brazo extendido: 250 mm.
- ▲ Longitud brazo encogido: 200 mm.
- ▲ Longitud del mango: 125 mm.
- ▲ Ángulo de apoyo: 21 grados.
- ▲ Ángulo de agarre: 104,5 grados.
- ▲ Longitud de caña: 674-980 mm.

### **Precauciones:**

- ▲ Comprobar que el peso del usuario no exceda del máximo permitido de 125 Kg.
- ▲ Utilizarlo en posición vertical, no inclinado.
- ▲ Vigilar el desgaste de la contera y cambiarla cuando sea necesario, utilizando conteras originales.
- ▲ Máxima precaución en suelos mojados y/o superficies deslizantes.
- ▲ Desechar el producto si está deteriorado o es defectuoso, o bien ha sufrido alguna rotura durante su uso.

### **Lavado y secado:**

- ▲ Se recomienda lavar periódicamente la empuñadura y codera con jabón neutro y agua tibia.
- ▲ Secar completamente con un trapo limpio.

**Condiciones de almacenaje:**

- ▲ Debido a que se trata de un producto inflamable, no debe almacenarse directamente al sol ni junto a una fuente de calor.

**Alergias:**

- ▲ Los materiales son hipoalergénicos, no obstante, pueden surgir problemas de hipersensibilización a algunos de sus componentes (alergias, dermatitis de contacto, etc.).
- ▲ En caso de que se manifestasen alguno de estos síntomas acuda a su médico.

**Normativa:**

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.

