

## BOLSAS DE AGUA CALIENTE CORYSAN



Referencia	Código Nacional	Modelo	Capacidad aprox.	EAN
907212	242743.3	Paño M-2	1,8 L	8470002427433
907213	242735.8	Paño M-3	2 L	8470002427358
907222	178095.9	Lana M-2	1,8 L	8470001780959
907223	180810.3	Lana M-3	2 L	8470001808103
907202	242750.1	Goma M-2	1,8 L	8470002427501
907252	-	Tapón de recambio pack 2u.	-	8428166972528

### Indicaciones:

- ▲ Las bolsas de agua caliente están indicadas para la aplicación local de calor.

### Composición:

- ▲ Bolsa 100% caucho natural.
- ▲ Tapón de polipropileno.

**Modo de empleo:**

- ▲ La primera vez que vaya a utilizar la bolsa de agua caliente, recomendamos que primero sople y posteriormente llene la bolsa con agua fría para asegurarse que las paredes están totalmente separadas.
- ▲ Sostenga el cuello de la bolsa y llénela en posición vertical hasta un máximo de dos tercios de su capacidad.
- ▲ Elimine el aire y enrosque el tapón lo suficiente para conseguir su flexibilidad y garantizar que no haya fugas.

**Advertencias y precauciones:**

- ▲ Las bolsas de agua caliente pueden causar quemaduras graves, evite el contacto directo prolongado con la piel.
- ▲ El llenado de la bolsa sólo deberá ser realizado por un adulto.
- ▲ Se recomienda no llenarla al máximo.
- ▲ No llenar con agua hirviendo.
- ▲ Asegúrese de que la bolsa no esté demasiado caliente antes de usarla o tenga fugas, especialmente cuando vaya a ser usada por un niño.

**Normativa:**

- ▲ British Standard BS 1970:2012.