



SILLA ALUMINIO ACOMPAÑANTE CYMAM GIGIA



Referencia	Talla	Código Nacional	EAN
906028	43cm.	169889.6	8470001698896
906029	46cm.	-	8428166960297










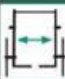


Indicaciones:

- ▲ Producto diseñado para permitir el desplazamiento de las personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.

Características:

- ▲ Silla de aluminio azul, ligera y plegable.
- ▲ Asiento y respaldo de Nylon acolchado negro, unidas por una pieza de velcro, aportando rigidez y evita corrientes de aire en la zona lumbar del usuario.
- ▲ Respaldo abatible, doblándose por la mitad, reduciendo el espacio durante su transporte y guardado.
- ▲ Ruedas antipinchazos:
 - Delanteras de PVC, negras, de 200mm. de diámetro.
 - Traseras de PU, negras de 300mm. de diámetro.
- ▲ Reposabrazos no abatibles y de formato largo para mayor comodidad de apoyo.
- ▲ Reposapiés abatibles hacia el exterior, desmontables y graduables en altura.

- ▲ Doble sistema de frenos: usuario y acompañante.
- ▲ Freno de acompañante en los puños con opción a freno progresivo y de bloqueo.
- ▲ Cinturón de seguridad.
- ▲ Peso máximo de usuario: 136Kg.
- ▲ Incluye bolsillo portaobjetos en la parte trasera del respaldo.
- ▲ Medias según modelo:

Longitudes cm Peso kg													PESO SILLA
MOD. 43	43	49.5	40	48	24	43	51	99	97	27	136	12	
MOD. 46	46	49.5	40	48	24	43	54	99	97	27	136	12	

Mantenimiento y limpieza:

- ▲ Comprobar periódicamente que todos los componentes (pernos, tuercas, ruedas...) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.
- ▲ Comprobar si los neumáticos están dañados y/o desgastados.
- ▲ Comprobar el funcionamiento de los frenos, asegurar que se pueden accionar fácilmente y que las articulaciones no están desgastadas.
- ▲ Mantener la silla lejos de la luz directa del sol, ya que las partes tapizadas pueden calentarse y causar lesiones en la piel.
- ▲ Para la limpieza utilizar detergentes neutros y secar con un trapo suave.
- ▲ Limpiar con un desinfectante no abrasivo, si la silla va a ser utilizada por otro usuario, todas las partes que entraron en contacto con el paciente anterior.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.