



## SILLA ACERO ACOMPAÑANTE CYMAM NOEGA



Referencia	Talla	Código Nacional	EAN
906031	43cm.	169890.2	8470001698902
906032	46cm.	-	8428166960327

### Indicaciones:

- ▲ Producto diseñado para permitir el desplazamiento de las personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.

### Características:

- ▲ Silla de acero azul ligero plegable.
- ▲ Asiento y respaldo de Nylon negro lavable.
- ▲ Ruedas de PU gris antipinchazos:
  - Delanteras: 200mm de diámetro x 50mm de ancho.
  - Traseras: 300mm de diámetro x 50mm de ancho.
- ▲ Reposabrazos abatibles.
- ▲ Reposapiés extraíbles y regulables en altura.
- ▲ Sistema doble frenos: usuario y acompañante.
- ▲ Freno de acompañante en los puños con opción a freno progresivo y de bloqueo.

- ▲ Cinturón de seguridad.
- ▲ Peso máximo de usuario: 135Kg.
- ▲ Incluye bolsillo portaobjetos en la parte trasera del respaldo.
- ▲ Medias según modelo:

Longitudes cm												PESO SILLA
Peso kg												
<b>MOD. 43</b>	43	49	43	45	25	43	60	<b>89</b>	110	25	135	15
<b>MOD. 46</b>	46	49	43	45	25	46	63	<b>89</b>	110	25	135	17

### Mantenimiento y limpieza:

- ▲ Comprobar periódicamente que todos los componentes (pernos, tuercas, ruedas...) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.
- ▲ Comprobar si los neumáticos están dañados y/o desgastados.
- ▲ Comprobar el funcionamiento de los frenos, asegurar que se pueden accionar fácilmente y que las articulaciones no están desgastadas.
- ▲ Comprobar que la silla se pliega y despliega con facilidad.
- ▲ Comprobar que los reposabrazos estén firmemente sujetos pero que sean fáciles de desmontar.
- ▲ Mantener la silla lejos de la luz directa del sol, ya que las partes tapizadas pueden calentarse y causar lesiones en la piel.
- ▲ Para la limpieza utilizar detergentes neutros. Utilizar agua y jabón para la tapicería del asiento y del respaldo. Para la estructura usar un trapo suave.
- ▲ Limpiar bien la silla después de haber sido expuesta a la arena y la sal del mar, ya que pueden corroer la estructura de la silla.
- ▲ Limpiar con un desinfectante no abrasivo, si la silla va a ser utilizada por otro usuario, todas las partes que entraron en contacto con el paciente anterior.

### Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.