



## ROLLATOR FRENO PRESIÓN CYMAM BULNES



Referencia	Código Nacional	EAN
906024	173134.0	8470001731340

### Indicaciones:

- ▲ Producto de apoyo a la movilidad de personas.
- ▲ Ayuda a la deambulación, aportando estabilidad y seguridad durante la marcha.
- ▲ Para usuarios con movilidad reducida, que presentan un déficit de movilidad, dificultad motora, problemas de equilibrio o que requieran cualquier tipo de apoyo en la deambulación.

### Características:

- ▲ Color: Azul.
- ▲ Material: Aluminio.
- ▲ Ligero.
- ▲ Plegable.
- ▲ Asiento acolchado con respaldo abatible.
- ▲ Freno por presión que se activa desde las empuñaduras para frenar las ruedas traseras.



- ▲ Empuñadura regulable.
- ▲ 4 ruedas de PVC de 110mm de diámetro.
- ▲ Cesta de tela porta objetos.
- ▲ Bolsillo con cremallera bajo el asiento.
- ▲ Peso máximo de usuario: 100Kg.
- ▲ Dimensiones:
  - Ancho asiento: 35cm.
  - Fondo asiento: 30cm.
  - Altura asiento – suelo: 54cm.
  - Alto respaldo: 75cm.
  - Altura total: 82 – 90cm.
  - Ancho total: 64cm.
  - Fondo total: 62cm.
  - Peso producto: 4,6Kg.

### **Mantenimiento y Limpieza:**

- ▲ Comprobar periódicamente que todos los componentes (pernos, tuercas, empuñaduras, ruedas, conteras, frenos...) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.
- ▲ Para la limpieza utilizar detergentes neutros y secar con un trapo suave.
- ▲ Para su desinfección utilizar un desinfectante no abrasivo.
- ▲ Mantener el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre en su embalaje.

### **Precauciones:**

- ▲ Producto diseñado para ser utilizado por un único usuario.
- ▲ Debe ser utilizado por personas que tengan capacidad motora y cognitiva suficiente para utilizarlo sin riesgo.
- ▲ Las ruedas y conteras deben estar en contacto con el suelo para garantizar la estabilidad del andador.
- ▲ Antes de sentarse, asegurarse que el andador está en una posición segura y accionar el freno, presionando firmemente en ambas empuñaduras para bloquear el movimiento.



- ▲ Apoyarse siempre sobre ambos manillares, tanto en la marcha como al levantarse del asiento.
- ▲ No utilizar el asiento del andador para trasladar cosas o personas.
- ▲ No colgar bolsas ni otros artículos de las empuñaduras, podría producirse inestabilidad y/o vuelco del andador.
- ▲ Utilizar el andador solo sobre superficies sólidas y planas. Tenga especial cuidado en el paso de bordillos, evitando aquellos más altos.
- ▲ No utilizar el andador para subir escaleras.
- ▲ Al plegar el andador, asegurarse de que ninguna parte de la ropa o del cuerpo pueda quedar atrapada.
- ▲ Tenga en cuenta que las partes acolchadas del andador (tanto las empuñaduras como el asiento y el respaldo) expuestas a la luz solar directa se calientan y pueden causar quemaduras en la piel por contacto.

#### **Normativa:**

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.

