



## SILLA DE REDAS ALUMINIO VIAJE CYMAM LUARCA



Referencia	EAN
906038	8437018156900

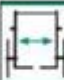


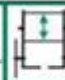





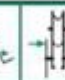

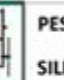
### Indicaciones:

- ▲ La silla de ruedas Luarca, se recomienda para aquellos usuarios que, por diversas circunstancias, tengan mermada su capacidad de deambulación y necesiten una silla muy ligera, que le confiere unas mínimas dimensiones al estar plegada, así como un ancho total muy contenido, lo cual favorecerá el paso por lugares estrechos.

### Características:

- ▲ Silla de aluminio, ligera y plegable.
- ▲ Ancho de asiento: 43cm.
- ▲ Tapicería de Nylon negro.
- ▲ Ruedas antipinchazos:
  - Delanteras de PVC, negras, de 150mm. de diámetro.
  - Traseras de PVC, negras de 200mm. de diámetro.
- ▲ Suspensión en ruedas delanteras y en eje trasero.
- ▲ Reposabrazos abatibles de aluminio recubierto de FOAM.
- ▲ Reposapiés abatibles de PVC.

- ▲ Freno de acompañante en los puños con función de bloqueo.
- ▲ Peso máximo de usuario: 100Kg.
- ▲ Incluye bolsillo portaobjetos en la parte trasera del respaldo.
- ▲ Medias según modelo:

Longitudes cm													PESO SILLA
MOD. 43	43	50	41	43	24	42	51	90	100	32	100	8.5	

### Mantenimiento y limpieza:

- ▲ Comprobar periódicamente que todos los componentes (pernos, tuercas, ruedas...) se encuentran correctamente ajustados y en perfecto estado de uso.
- ▲ Comprobar si los neumáticos están dañados y/o desgastados.
- ▲ Comprobar el funcionamiento de los frenos, asegurar que se pueden accionar fácilmente y que las articulaciones no están desgastadas.
- ▲ Mantener la silla lejos de la luz directa del sol, ya que las partes tapizadas pueden calentarse y causar lesiones en la piel.
- ▲ Para la limpieza utilizar detergentes neutros y secar con un trapo suave.
- ▲ Limpiar con un desinfectante no abrasivo, si la silla va a ser utilizada por otro usuario, todas las partes que entraron en contacto con el paciente anterior.

### Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.