



SILLA RUEDAS DUCHA/WC PLEGABLE ERCINA



Referencia	Código Nacional	EAN
905038	176713.4	8470001767134

Indicaciones:

- ▲ Producto de apoyo para el aseo.
- ▲ Su finalidad es facilitar la higiene personal del usuario, ya sea dentro de la ducha, como de soporte para el lavabo, en el uso como inodoro (WC) o de soporte para el uso del mismo, también permite traslados en interiores.
- ▲ Indicada para usuarios de silla de ruedas, personas con inestabilidad o incapacidad para mantenerse en pie, y en general para personas con patologías que afectan a la movilidad y que precisan de ayuda para el aseo e higiene.

Características:

- ▲ Color: Blanco.
- ▲ Material: Aluminio y PVC sanitario.

- ▲ Dimensiones:
 - Ancho asiento: 39cm.
 - Fondo asiento: 42cm.
 - Altura asiento – suelo: 53cm.
 - Altura total: 86cm.
 - Ancho total silla: 56,5cm.
- ▲ Peso producto: 7,5Kg.
- ▲ Peso máximo de usuario: 100Kg.
- ▲ Silla de ducha y WC plegable.
- ▲ 4 ruedas de giro 360° para facilitar la movilidad.
- ▲ Diámetro de las ruedas: 125mm.
- ▲ Ruedas traseras con freno de bloqueo.
- ▲ Asiento blando para mayor confortabilidad.
- ▲ Asiento con tapa para la cubeta.
- ▲ Cubeta extraíble, para facilitar la limpieza.
- ▲ Reposapiés y reposabrazos abatibles.
- ▲ Asidera trasera para el fácil manejo y transporte.
- ▲ Reposabrazos confortables, recubiertos de Foam.

Mantenimiento y Limpieza:

- ▲ Realizar comprobaciones periódicas para asegurar que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar.
- ▲ Comprobar con regularidad que las ruedas no tengan cabellos o pelusas. Retirarlos si fuera necesario.
- ▲ Para la limpieza de la silla de ducha usar detergentes neutros.
- ▲ Utilizar trapo suave para limpiar la estructura.
- ▲ Limpiar con algún desinfectante su la silla de ducha va a ser utilizada por otro usuario, todas las partes que entraron en contacto con el paciente anterior.
- ▲ Mantener el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre en su embalaje.

Precauciones:

- ▲ Se recomienda la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.
- ▲ Durante la transferencia del usuario a la silla de ducha, activar los frenos de las ruedas traseras, pisando la pestaña saliente sobre la rueda.
- ▲ Antes de desplazar al usuario, asegurarse de que el reposapiés está desplegado y los pies del paciente sobre el mismo.
- ▲ Proteja al paciente cuando suba o baje los reposabrazos.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.

