

COLECTOR DE ORINA CON TIRA



Referencia	Código Nacional	Talla	Diámetro aprox. (mm)	Presentación	EAN
304031	481796.6	1	20	Estuche de 30 juegos	8470004817966
304032	481804.8	2	25		8470004818048
304033	481812.3	3	30		8470004818123
304034	455790.9	4	35		8470004557909
304035	481820.8	5	40		8470004818208
304014	449793.9	4	35	Estuche de 12 juegos	8470004497939

Indicaciones:

- ▲ Indicado para los hombres que sufren pérdida involuntaria de orina.

Descripción:

- ▲ Colector fabricado en látex natural.
- ▲ Tira adhesiva a una cara, para la sujeción al pene.
- ▲ No estéril.
- ▲ Un solo uso.



- ▲ Diseñado para acomodar los cambios en el tamaño del pene y proporcionar flexibilidad suave a lo largo de la longitud del pene.
- ▲ El cono está diseñado para eliminar la posibilidad de torsión del sistema de drenaje, el bloqueo del flujo de orina y fugas, o que se hinche el colector.

Presentación:



- ▲ Presentación individual en bolsa sellada.
- ▲ Cada juego está formado por:
 - un colector de látex natural para el pene,
 - una tira de sujeción con adhesivo hipoalérgico sobre soporte de polietileno.

Instrucciones de uso:

Colocación del colector:

Limpiar y secar el pene, recortar el exceso de vello púbico.

1. Colocar el colector 2 cm por delante del glande y desenrollar cubriendo el pene en su totalidad.
2. Desenrollar suavemente el colector a lo largo de la longitud del pene.
3. Colocar la tira adhesiva en la parte posterior del pene, enrollándola en forma espiral sobre la funda de látex.
4. Conectar el colector a la bolsa de recogida de orina.

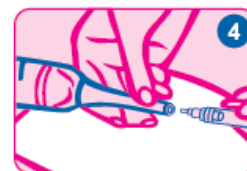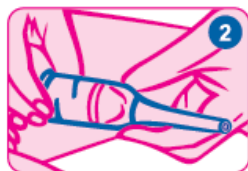

Retirada del colector:

1. Desconectar el colector de la bolsa de recogida de orina.
2. Retirar con cuidado la cinta adhesiva.
3. Desenrollar el colector a lo largo de la longitud del pene y levantar suavemente.



Recomendación:

- ▲ Cambiar el colector máximo cada 24 horas.
- ▲ No aplicar la cinta adhesiva con demasiada fuerza, a fin de evitar restricción de la circulación.

Precauciones:



- ▲ Producto **fabricado en látex**.
- ▲ No utilizar el producto si se sabe que es sensible o alérgico al látex. En caso de tener sospecha de sensibilidad al látex, dejar de utilizar el colector y comunicarlo al médico. No volver a usar el colector.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.