

COLECTOR DE ORINA CON APÓSITO



Referencia	Código Nacional	Talla	Diámetro aprox. (mm)	Presentación	EAN
304042	478438.1	P	25	Estuche de 30 juegos	8470004784381
304043	478446.6	M	30		8470004784466
304044	478453.4	G	35		8470004784534

Indicaciones:

- ▲ Indicado para los hombres que sufren pérdida involuntaria de orina.

Descripción:

- ▲ Colector fabricado en látex natural.
- ▲ Apósito con adhesivo en ambas caras, para la sujeción al pene.
- ▲ No estéril.
- ▲ Un solo uso.
- ▲ Está diseñado para acomodar los cambios en el tamaño del pene y proporcionar flexibilidad suave a lo largo de la longitud del pene.
- ▲ El cono está diseñado para eliminar la posibilidad de torsión del sistema de drenaje, el bloqueo del flujo de orina y fugas o que se hinche el colector.




Presentación:

- ▲ Presentación individual en bolsa sellada.
- ▲ Cada juego está formado por:
 - un colector de látex natural para el pene,
 - un apósito de sujeción con adhesivo hipoalérgico en ambas caras, sobre soporte de polietileno.

Instrucciones de uso:

Colocación del colector:

- Limpiar y secar el pene, recortar el exceso de vello púbico.
1. Situar el apósito alrededor del pene, a partir del glande y sin ejercer excesiva presión.
 2. Colocar el colector 2 cm por delante del glande y desenrollar cubriendo el pene en su totalidad.
 3. Ejercer presión sobre la zona del apósito por encima del colector asegurándose que queda adherido.
 4. Conectar el tubo de drenaje de la bolsa de recogida de orina a la salida del colector.

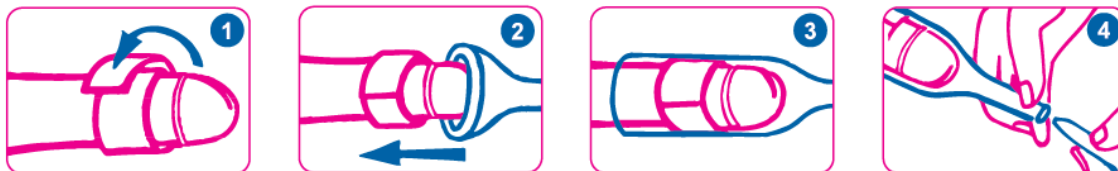

Retirada del colector:

1. Desconectar el colector de la bolsa de orina.
2. Desenrollar el colector a lo largo de la longitud del pene y levantar suavemente.
3. Retirar con cuidado la cinta adhesiva.



Recomendación:

- ▲ Cambiar el colector máximo cada 24 horas.
- ▲ No aplicar la cinta adhesiva con demasiada fuerza, a fin de evitar restricción de la circulación.



Precauciones:

- ▲ Producto **fabricado en látex**.
- ▲ No utilizar el producto si se sabe que es sensible o alérgico al látex. En caso de tener sospecha de sensibilidad al látex, dejar de utilizar el colector y comunicarlo al médico. No volver a usar el colector.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario de **Clase I**. Cumple los requisitos generales de seguridad y funcionamiento establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017, por el que se regulan los Productos Sanitarios.

