



ESTETOSCOPIOS BOSO: BOLI / BOKI



| Referencia | Modelo | Indicado para: | Presentación | EAN |
|------------|--------|----------------|--------------|---------------|
| 503001 | BOLI | Adulto | unidad | 8428166530018 |
| 503004 | BOKI | Pediátrico | unidad | 8428166530049 |

Descripción:

- ▲ Estetoscopio de peso ligero con una pieza de doble pecho.
- ▲ La cápsula o cabezal del fonendoscopio puede girarse 180° para su uso como campana o como membrana.
- ▲ Cuando la cápsula queda ajustada en una de las dos posiciones puede oírse un clic.
- ▲ El uso de la membrana o la campana depende de la parte del cuerpo que vaya a auscultarse.
- ▲ La membrana se utiliza para auscultar frecuencias altas, y la campana para frecuencias bajas.
- ▲ En los auriculares pueden utilizarse olivas blandas o duras para obtener la máxima sensibilidad acústica y comodidad.
- ▲ Para sustituir las olivas, basta desenroscarlas de los auriculares y enroscar las olivas nuevas.
- ▲ Para evitar lesiones, asegúrese antes de cada uso de que las olivas están bien montadas.

Indicaciones:

- ▲ El fonendoscopio es un instrumento de diagnóstico para la auscultación.
- ▲ Tras introducir las olivas en los oídos, la cápsula debe aplicarse sobre la zona del cuerpo que se desea auscultar aplicando una ligera presión.
- ▲ Para evitar lesiones, no introduzca las olivas de forma excesivamente profunda en el canal auditivo.
- ▲ No utilice el fonendoscopio sin membrana.
- ▲ Emplee exclusivamente recambios originales Boso.

Composición y medidas:

| BOLI | Material | Medidas | Color |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Cabeza del estetoscopio | Aluminio | M43.5×0.75 | Color natural |
| Diafragma | PVC | Φ43.5±0.5mm | Blanquecino o transparente |
| Anillo | Gel de sílice | Φ28±0.5mm | Negro |
| Rosca | Aluminium Oxidation | Φ47.0±0.5mm | Color natural |
| Tubo-Y | PVC | 625±15mm, Φ8±1.5 (diámetro externo) | Negro |
| Binaural | Latón cromado | Φ5±0.1mm / 167.0±5mm | Cromado |
| Olivas blandas | Propileno | Φ12.6±0.5mm / 13.9±0.5mm | Blanco |
| Olivas duras | PVC | Φ16±1mm / 18±0.5mm | Negro |

| BOKI | Material | Medidas | Color |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Cabeza del estetoscopio | Aluminio | M35×0.75 | Color natural |
| Diafragma | PVC | Φ35.0±0.5mm | Blanquecino o transparente |
| Anillo | Gel de sílice | Φ24.5±0.5mm | Negro |
| Rosca | Aleación de zinc cromado | Φ38.0±0.5mm | Color natural |
| Tubo-Y | PVC | 625±15mm, Φ8±1.5 | Negro |
| Binaural | Latón cromado | Φ5±0.1mm / 167.0±5mm | Cromado |
| Olivas blandas | Propileno | Φ12.6±0.5mm / 13.9±0.5mm | Blanco |
| Olivas duras | PVC | Φ16±1mm / 18±0.5mm | Negro |

Componentes incluidos:

- ▲ Fonendoscopio
- ▲ Olivas de repuesto
- ▲ Membranas de repuesto
- ▲ Instrucciones de uso

Limpieza:

- ▲ Para la limpieza, emplee un paño suave humedecido con agua ligeramente jabonosa o con alcohol (alcohol isopropílico al 70%).
- ▲ La membrana solo debe limpiarse utilizando un paño suave humedecido con alcohol (alcohol isopropílico al 70%).
- ▲ No utilice nunca productos de limpieza abrasivos, benceno ni otros disolventes.

Conservación:

- ▲ No exponga el fonendoscopio a calor o frío extremos.
- ▲ No esterilice el fonendoscopio mediante vapor.
- ▲ No sumerja el fonendoscopio en líquidos de limpieza.
- ▲ El fonendoscopio puede resultar dañado por instrumentos cortantes o puntiagudos.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.