

KIT ACCESORIOS AEROSOL CORYSAN/CORYNEB


Referencia	EAN
501070	8428166510706

Indicaciones:


- ▲ Kit de accesorios para los aerosoles Corysan y Coryneb.

Contenido:

- ▲ 1 ampolla Neboplus
- ▲ 1 mascarilla adulto
- ▲ 1 mascarilla pediátrica
- ▲ 1 boquilla
- ▲ 1 horquilla nasal adulto
- ▲ 1 horquilla nasal pediátrica
- ▲ 1 tubo de conexión.
- ▲ 1 pixper + 1 selector (azul)

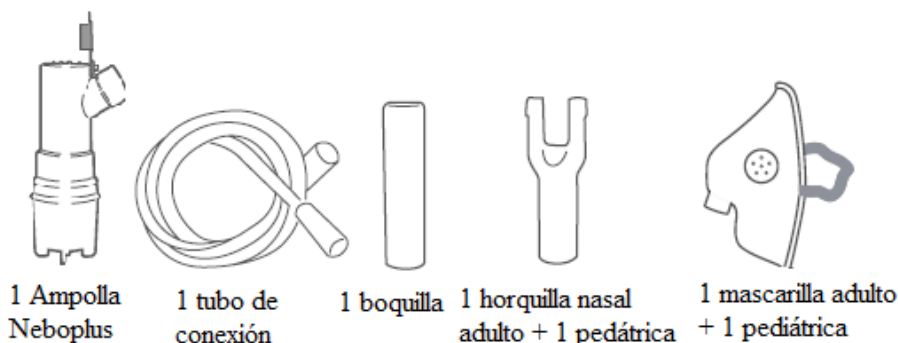

Montaje y utilización de la ampolla:

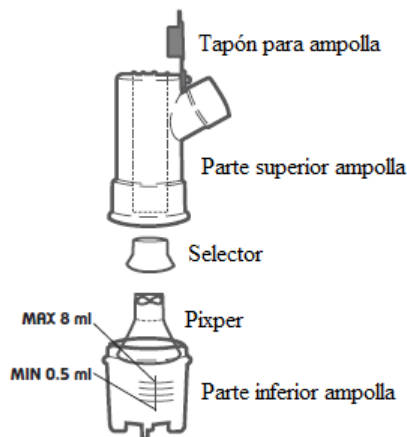




La ampolla Neboplus puede montarse de los siguientes modos según su aplicación:

- **Pixper azul (sin selector):** Las partículas se concentran en las vías respiratorias altas. Principales enfermedades del tronco superior: sinusitis, faringe-amigdalitis, laringitis, tratamientos de alergias.
- **Pixper + selector azul:** Las partículas se extienden en todas las vías respiratorias. Principales enfermedades del tronco medio: bronquitis, enfermedades traqueobronquiales, tratamientos de alergias.

La ampolla Neboplus también puede utilizarse según dos modalidades diferentes:

- A. **Con el tapón de la ampolla cerrado:** se obtiene una nebulización lenta.
- B. **Con el tapón de la ampolla abierto:** se obtiene una nebulización estándar.

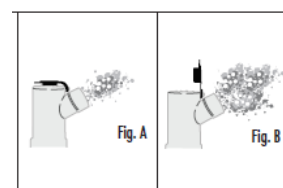

Atención: La horquilla nasal, sólo puede utilizarse con el tapón de la ampolla cerrado.

Limpieza de los accesorios

- ▲ Antes del primer uso, después del uso, y si es necesario también antes de usos posteriores, lavar los accesorios (menos el tubo) cuidadosamente con agua tibia y secarlos con un paño. Guardarlos en un lugar limpio.
- ▲ No utilizar sustancias que podrían resultar tóxicas al entrar en contacto con la piel o las mucosas en caso de ingestión o inhalación. Si resulta necesario desinfectar o esterilizar los accesorios.
- ▲ La eventual humedad residual en el tubo se puede eliminar haciendo funcionar el aerosol durante unos minutos sin la ampolla conectada. Sustituir el tubo si está sucio.
- ▲ Los accesorios (excepto el tubo) se pueden esterilizar con productos específicos como el método MILTON[®]: enjuagarlos hasta eliminar todo rastro de desinfectante, secarlos y guardarlos en un ambiente seco y no polvoriento. Los accesorios (menos el tubo) se pueden esterilizar en agua hirviendo (100°C) durante al menos 40 minutos o en autoclave (120°C) durante al menos 20 minutos.
- ▲ No apoyar pesos sobre los accesorios y no plegarlos; no superar las temperaturas indicadas; utilizar una bolsa estéril.
- ▲ En el agua y en el vapor, los accesorios de PVC pierden la transparencia; el fenómeno desaparece después de unos días de mantenerse secos y no incide en su aptitud para el uso.



- ▲ Todos los accesorios son esterilizables (excepto el tubo) hasta un máximo de 100 veces; después hay que sustituirlos. La frecuencia y el intervalo entre una esterilización y la siguiente se establecen a discreción del paciente y/o de la clínica y también dependen de la patología. Normalmente los accesorios deberían esterilizarse con cada cambio de paciente.
- ▲ No lave los accesorios en el lavavajillas. En caso de utilizar el aparato en grupos de alto riesgo (por ejemplo, pacientes con fibrosis quística), consulte a su médico para que le indique las precauciones a seguir.



Alergia al látex:

- ▲ Las gomas elásticas de las mascarillas pueden contener látex.

Normativa:

- ▲ Producto Sanitario con marcado CE, Clase IIa.