



ASPIRADOR SUCTION PUMP



Referencia	Código Nacional	EAN
501020	175086.0	8470001750860

Indicaciones:

- ▲ Unidad de succión para uso en el hogar, diseñado específicamente para personas que se han sometido a traqueotomía.
- ▲ Recomendado para la traqueotomía permanente.
- ▲ Indicado para tratamientos domiciliarios.

Descripción:

- ▲ Incorpora una sonda de aspiración para prueba inicial.
- ▲ Aspiración de mucosidades.
- ▲ Seguro y fiable, gracias al dispositivo de protección para evitar el ingreso del líquido en la bomba aspirante.
- ▲ Fácil de usar y limpiar.
- ▲ Diseño compacto con asa en la parte superior de la caja de plástico para permitir un fácil transporte.
- ▲ Filtro antibacteriano opcional.
- ▲ Capacidad del vaso: 250cc.
- ▲ Flujo de aire (aspiración): 11 litros/minuto.
- ▲ Presión de vacío: -70kPa.
- ▲ Potencia: 190VA.



Modo de empleo:

- ▲ Antes de utilizar el aparato, debe asegurarse de que no hay polvo, incrustaciones, grumos o sustancias líquidas dentro de los tubos de conexión, dentro del vaso de protección, dentro de la botella y de las respectivas tapas.
- ▲ En presencia de patologías con riesgo de infección y contaminación microbiana, se aconseja el uso personal de los accesorios (vaso, botella y tubos de conexión).
- ▲ Los materiales utilizados para el contacto con las secreciones son polímeros termoplásticos con elevada estabilidad y resistencia química (PP, PC). De todas formas, no es posible excluir interacciones.
- ▲ Evitar contactos prolongados del líquido con vaso, botella o tubos; lavar o desinfectar inmediatamente después del uso.
- ▲ En caso de que se presenten situaciones anómalas, por ejemplo ablandecimientos o la formación de grietas en los accesorios, acabar rápidamente la operación y sustituir los materiales utilizados.

Limpieza y desinfección:

- ▲ Lavarse cuidadosamente las manos antes de empezar las fases de limpieza y desinfección de los accesorios.
- ▲ Quitar la cánula, el regulador manual y el tubo largo de la botella.
- ▲ Desconectar el otro tubo corto, tanto del vaso como de la botella.
- ▲ Destornillar la tapa de la botella, vaciar la botella y efectuar las otras operaciones de limpieza.
- ▲ Desconectar el tubo corto del vaso de protección y de la toma del aparato o del filtro antibacteriano.
- ▲ Para limpiar los accesorios inmediatamente después del uso, es suficiente con enjuagar las piezas sueltas con agua corriente.
- ▲ Desinfectar con desinfectantes químicos a base de cloro activo (seguir las instrucciones del fabricante).
- ▲ Nunca lavar el aparato bajo agua corriente o sumergiéndolo.
- ▲ Para limpiar la envoltura, utilizar solamente un paño humedecido con detergente (no abrasivo).

Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase IIb.