



BOLSA DE RECOGIDA DE ORINA 2L CORYSAN - COMPLET



Referencia	Código Nacional	Presentación envase
303020	488874.4	30 unidades

Indicaciones:

- ▲ Bolsa para la recogida de orina, de cama, con capacidad aproximada de 2000 c.c. y tubo de 90 cm.

Descripción:

- ▲ Volumen aproximado 2000 ml.
- ▲ Bolsa fabricada con dos láminas de cloruro de polivinilo soldadas con alta frecuencia.
- ▲ Lámina frontal transparente con aspecto lechoso y escala graduada aproximativa.
- ▲ Lámina trasera blanca, para mejor control visual de la orina.
- ▲ En el extremo superior de la bolsa hay dos hendiduras para colocar el soporte colgador (incluido) para su fijación a la cama.
- ▲ Con válvula de seguridad anti-retorno.
- ▲ Con válvula de vaciado.
- ▲ Tubo de admisión fabricado en cloruro de polivinilo de aspecto translúcido y longitud 90 cm (± 3 cm). Soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia.
- ▲ Conector fabricado con cloruro de polivinilo blanco.
- ▲ Funda o capuchón del conector fabricado con polietileno violeta.



Accesorios:

- ▲ Colgador de plástico violeta.

Instrucciones de uso:

- ▲ Acoplar la bolsa, por las hendiduras de los extremos superiores, al colgador de plástico, y colgar la bolsa.
- ▲ Conectar la bolsa a la sonda o colector, por medio del conector situado al extremo del tubo.
- ▲ La bolsa debe quedar siempre en posición vertical.

Advertencias:

- ▲ Un solo uso. La reutilización de la bolsa puede producir riesgo de infección.
- ▲ No estéril.
- ▲ Este no es un producto con función de medición.
- ▲ La bolsa debe ser vaciada en el WC antes de tirarla. Una vez vacía, descartar en la basura.

Conservación:

- ▲ Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de toda fuente de calor.

Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.