



BOLSA DE RECOGIDA DE ORINA PIERNA 750ml CORYSAN – EXTRA



| Referencia | Código Nacional | Presentación envase |
|------------|-----------------|---------------------|
| 303010 | 455782.4 | 30 unidades |

Indicaciones:

- ▲ Las bolsas de recogida de orina para pierna Corysan están indicadas para la recogida de orina diurna.

Descripción:

- ▲ Fabricadas con cloruro de polivinilo.
- ▲ Capacidad aproximada de 750 ml.
- ▲ Longitud del tubo: 55 cm. Soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia.
- ▲ Con válvula de seguridad anti-retorno.
- ▲ Con válvula de vaciado.
- ▲ Doble soldadura de seguridad, por radiación de alta frecuencia.
- ▲ Tubo de drenaje siliconizado, de alta resistencia al acodamiento.
- ▲ Conector fabricado con cloruro de polivinilo blanco.
- ▲ Funda o capuchón del conector fabricado con polietileno azul.



Accesorios:

- ▲ Cintas de sujeción de lycra con gemelos.

Instrucciones de uso:

- ▲ Acoplar el conector del extremo del tubo a la sonda o al colector de pene.
- ▲ En la parte superior de la bolsa hay dos orificios pre-troquelados para colocar la cinta de sujeción.

Advertencias:

- ▲ Un solo uso. La reutilización de la bolsa puede producir riesgo de infección.
- ▲ No estéril.
- ▲ Este no es un producto con función de medición.
- ▲ La bolsa debe ser vaciada en el WC antes de tirarla. Una vez vacía, descartar en la basura.

Conservación:

- ▲ Almacenar en lugar seco y fresco, alejado de toda fuente de calor.

Alergia al látex:

- ▲ No contiene látex.

Normativa:

- ▲ Producto sanitario con marcado CE, Clase I.