



## TAPONES DE OÍDOS – SILICONA MOLDEABLE - ITOH



Referencia	Código Nacional	EAN
906003	326033.6	8470003260336

### Descripción:

- ▲ Tapones de silicona moldeable.
- ▲ Estuche de 6 unidades.
- ▲ Moldeables.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Atenuación media (dB)	23.4	22.1	21.1	26.1	33.4	38.4	33.9
Desviación estándar (dB)	6.7	5.2	5.9	5.3	4.3	4.6	8.9
APV (dB)	16.7	16.9	15.2	20.8	29.1	33.8	25.0

<b>SNR = 24 dB</b>	<b>H = 27 dB</b>	<b>M = 20 dB</b>	<b>L = 18 dB</b>
Diámetro nominal = 15x15x8 mm			

### Indicaciones:

- ▲ Los protectores de oído ITOH<sup>®</sup> están especialmente diseñados para evitar cualquier tipo de trastorno o molestia en el conducto auditivo provocado por agentes externos:
  - Ruido, agua, viento, arena o polvo.
- ▲ Su uso está indicado para personas que padecen de insomnio, para estudiantes que necesiten silencio para su máxima concentración o para nadar en superficie consiguiendo un perfecto aislamiento.



### Instrucciones de uso:

- ▲ Lavar cuidadosamente las manos antes de su manipulación.
- ▲ Utilizar una pieza entera pre-cortada para cada oído, no dividir en trozos.
- ▲ Moldear haciendo rodar el tapón, formando un pequeño cono.
- ▲ Colocar el protector en el conducto auditivo presionando suavemente.
- ▲ Mantener la parte ancha del cono en el exterior del canal auditivo.



### Conservación:

- ▲ Los protectores de silicona moldeable son re-utilizables, siempre que se mantengan limpios y en buenas condiciones. En caso contrario deberán desecharse.
- ▲ Después de cada uso limpiar con jabón neutro y agua templada, dejar secar a temperatura ambiente.
- ▲ Compruebe regularmente el estado de los tapones para asegurar que están en buenas condiciones.
- ▲ Utilice el estuche para su almacenaje en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

### Advertencias:

- ▲ En caso de infección o perforación de tímpano, consulte con su médico antes de su utilización.
- ▲ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ▲ No utilizar para bucear.
- ▲ No insertar profundamente. Después de su uso, sacar el tapón de forma suave del oído.
- ▲ El uso de protectores es obligado en ambientes ruidosos.
- ▲ Ciertas sustancias químicas pueden producir un efecto negativo en los tapones.
- ▲ Los protectores de oído deben ser insertados, colocados y conservados siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ▲ No seguir las indicaciones puede perjudicar el efecto protector de los tapones. Contacte con el fabricante para más información.

### Normativa:

- ▲ Directiva 89/656/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.
- ▲ Normativa EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos Generales. Parte2: Tapones.