



**TAPONES DE OÍDOS – SILICONA INYECTADA ADULTOS y NIÑOS -  
(Modelo GOMA) - ITOH**



Talla	Referencia	Código Nacional	EAN
Adultos	906002	309260.9	8470003092609
Niños	906001	180617.8	8470001806178

**Descripción:**

- ▲ Tapones de silicona inyectada.
- ▲ Estuche de 2 unidades.

**Indicaciones:**

- ▲ Los protectores de oído ITOH<sup>®</sup> están especialmente diseñados para evitar cualquier tipo de trastorno o molestia en el conducto auditivo provocado por agentes externos:
  - Ruido, agua, viento, arena o polvo.
- ▲ Su uso está indicado para personas que sufren al entrarles agua en el oído mientras se duchan o para nadar en superficie consiguiendo un perfecto aislamiento.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Atenuación media (dB)	24.6	22.6	24.5	24.2	28.5	30.2	36.3
Desviación estándar (dB)	7.4	5.9	6.6	5.3	5.6	10.4	5.9
APV (dB)	17.2	16.7	17.9	18.9	22.9	19.8	30.4

<b>SNR = 22 dB</b>	<b>H = 22 dB</b>	<b>M = 19 dB</b>	<b>L = 18 dB</b>
Diámetro nominal = NIÑO 11 mm / ADULTO 13 mm			



### Instrucciones de uso:

- ▲ Lavar cuidadosamente las manos antes de su manipulación.
- ▲ El tubo aplicador sirve para empujar de manera más cómoda el protector.
- ▲ Colocar el protector en el conducto auditivo presionando suavemente hasta que el canal auditivo esté aislado.
- ▲ Retirar el aplicador si ha sido utilizado.



### Conservación:

- ▲ Los protectores de silicona inyectada son re-utilizables, siempre que se mantengan limpios y en buenas condiciones. En caso contrario deberán desecharse.
- ▲ Después de cada uso limpiar con jabón neutro y agua templada, dejar secar a temperatura ambiente.
- ▲ Compruebe regularmente el estado de los tapones para asegurar que están en buenas condiciones.
- ▲ Utilice el estuche para su almacenaje en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

### Advertencias:

- ▲ En caso de infección o perforación de tímpano, consulte con su médico antes de su utilización.
- ▲ Mantener fuera del alcance de los niños
- ▲ No utilizar para bucear.
- ▲ No insertar profundamente. Después de su uso, sacar el tapón de forma suave del oído.
- ▲ El uso de protectores es obligado en ambientes ruidosos.
- ▲ Ciertas sustancias químicas pueden producir un efecto negativo en los tapones.
- ▲ Los protectores de oído deben ser insertados, colocados y conservados siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ▲ No seguir las indicaciones puede perjudicar el efecto protector de los tapones. Contacte con el fabricante para más información.

### Normativa:

- ▲ Directiva 89/656/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.
- ▲ Normativa EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos Generales. Parte2: Tapones.